

epitact®

epitact®

+ de 270 000
personnes
touchées !



POUCE DOULOUREUX, RHIZARTHROSE



Découvrez
l'Orthèse
pouce souple

Demandez conseil à votre pharmacien ou droguiste.
Produit issu de la recherche Millet Innovation et fabriqué en FRANCE.

Distribution : F. Uhlmann-Eyraud SA - 1217 MEYRIN
www.uhlmann.ch - Email : epitact@uhlmann.ch




19385U-FR • 05/14 • 140419





QU'EST-CE QUE LA RHIZARTHROSE ?

La rhizarthrose touche principalement la femme après 50 ans et débute le plus souvent par la main dominante mais les deux mains peuvent aussi être atteintes. Les facteurs génétiques, la ménopause ou la répétition de certains gestes semblent favoriser son apparition. Son évolution par crises provoque de douloureuses poussées inflammatoires et aboutit progressivement à l'enraidissement et à la déformation du pouce. Il devient peu à peu impossible de saisir un objet entre le pouce et l'index ou les autres doigts.

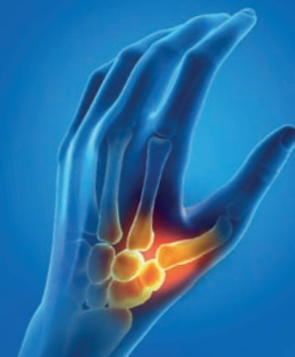

COMMENT FONCTIONNE L'ORTHÈSE POUCE SOUPLE ?

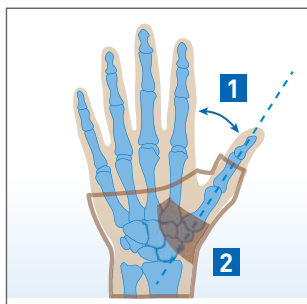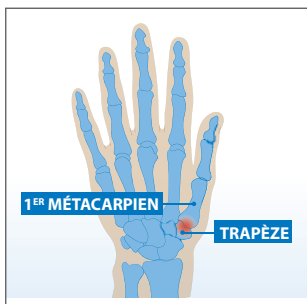

ELLE AGIT SUR 3 FACTEURS COMPLÉMENTAIRES :

1. MAINTIENT LE POUCE EN POSITION DE REPOS

L'alignement des os du pouce va limiter les forces s'exerçant sur l'articulation trapèzo-métacarpienne et soulager la douleur (1).

2. ABSORBE LES MICRO-MOBILISATIONS TRAUMATISANTES

Pendant la journée, le pouce semble au repos alors qu'il bouge sans cesse avec le déplacement des mains dans l'espace. L'orthèse souple va maintenir le pouce et le 1^{er} métacarpien sans les immobiliser. Ce maintien proprioceptif va aider à absorber les micro-mobilisations traumatissantes et limiter ainsi les poussées inflammatoires douloureuses.

3. MAINTIENT LA CHALEUR LOCALE

L'orthèse EPITACT® a un effet antalgique en maintenant la chaleur locale grâce aux propriétés de son tissu et de son tendon en silicone Epithelium Flex® (2).

ORTHÈSE POUCE SOUPLE

EPITHELIUMFLEX®

Le port pendant la journée de l'Orthèse pouce souple EPITACT®, aide à soulager les douleurs articulaires à la base du pouce (rhizarthrose), en limitant les micro-mobilisations passives traumatissantes.

- **Fonctionnalités** : Elle permet pendant la journée de conserver l'entière fonctionnalité de la main. Elle est complémentaire aux orthèses rigides, mieux adaptées à un port nocturne.
- **Durée de vie** : Plusieurs mois.
- **Entretien** : Lavable en machine à 40°C dans le filet de lavage prévu à cet effet.



	Vendue à l'unité	Mesurez le contour de votre poignet (Si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez la plus petite)		
		S 13 ≤ O ≤ 14,9 cm	M 15 < O ≤ 16,9 cm	L 17 < O ≤ 19 cm
ORTHÈSE POUCE	PHARMACODE	PHARMACODE	PHARMACODE	
MAIN DROITE	5995708	5995720	5995743	
MAIN GAUCHE	5995714	5995737	5995766	

ERGONOMIE ADAPTÉE AUX GESTES DE LA VIE QUOTIDIENNE



Contrairement aux orthèses rigides, l'Orthèse pouce souple EPITACT® est conçue pour s'adapter aux contraintes de la vie quotidienne. Elle n'intègre aucun «scratch» agressif risquant d'abîmer les vêtements. Fine et discrète, elle vous permet de continuer à porter votre montre ou vos bijoux.