

DEUTSCH

THERMOFORM-ANLEITUNG




Zu Beginn müssen Sie unbedingt die gesamte Thermoform-Anleitung durchlesen, um alle Schritte zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen ebenfalls, das Anleitungsvideo unter www.epitact.com anzusehen.




ERFORDERLICHE ELEMENTE:

- 1 Dosierbecher
- 1 Topf (zum Erhitzen von Wasser auf 100°C)
- 1 Behälter (wärmeresistent)
- 1 Gabel
- 1 Tuch
- 1 Uhr


GESCHÄTZTE ZEIT: 10Min.

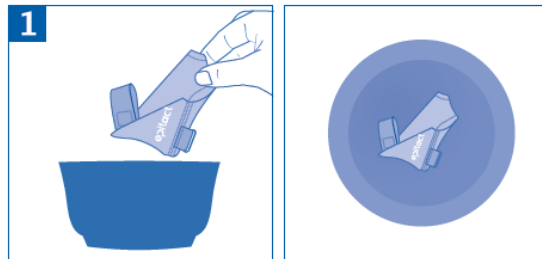


Die starre Daumenbandage in den Behälter legen.

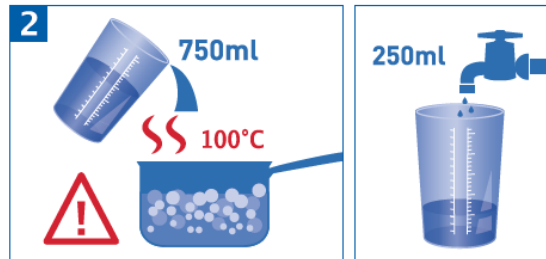

750 ml Wasser mit dem Dosierbecher abmessen und auf 100°C erhitzen. **Unbedingt warten, bis das Wasser stark kocht, um eine Wassertemperatur von 100°C zu gewährleisten.** Dann 250 ml Leitungswasser abmessen.

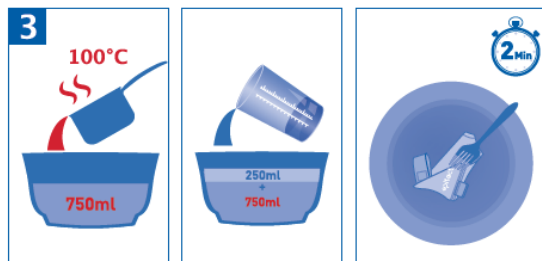


Zuerst die 750 ml kochendes Wasser auf die Daumenbandage gießen und dann die 250 ml Leitungswasser hinzufügen. Die Daumenbandage mithilfe einer Gabel 2 Minuten lang im Behälter untergetaucht halten, um die thermoformbare Verstärkung zu erweichen.

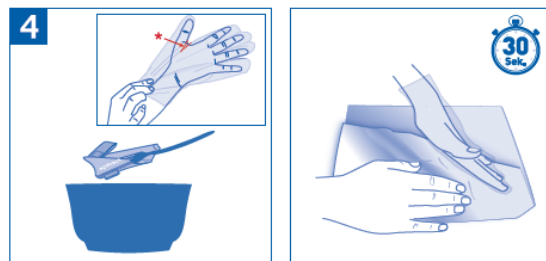


Den Kunststoffhandschuh über jene Hand ziehen, für die die Daumenbandage geformt wird. (*Für die Größe L ist der Handschuh absichtlich geschlitzt). Die Daumenbandage mithilfe der Gabel aus dem Wasser nehmen. Die Daumenbandage sorgfältig mit dem Tuch 30–40 Sekunden lang abtupfen.




Daumenbandage aus dem Wasser nehmen und nach einer Minute über den Handschuh anziehen, ohne das Klettband anzubringen. Positionieren Sie den Ellbogen mit vertikal locker gehaltener Hand und dem Handgelenk in einer Linie mit dem Unterarm auf einem Tisch.

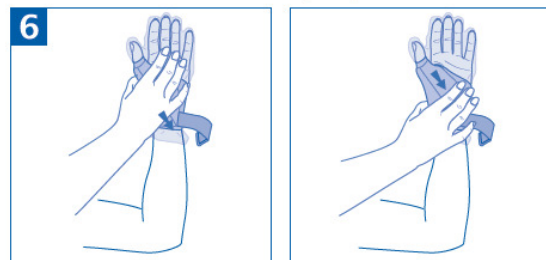

Mit der freien Hand die Daumenbandage einige Sekunden lang rund um Ihren Daumen und Ihr Handgelenk sanft formen.

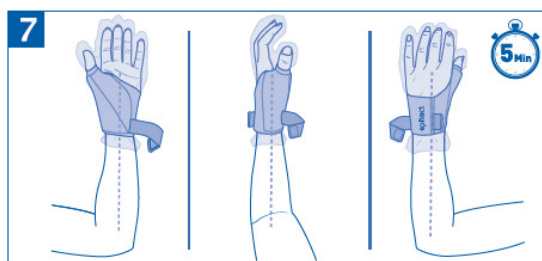

In dieser Position warten und den Daumen 5 Minuten unbeweglich halten, bis sich die Daumenbandage gehärtet hat.

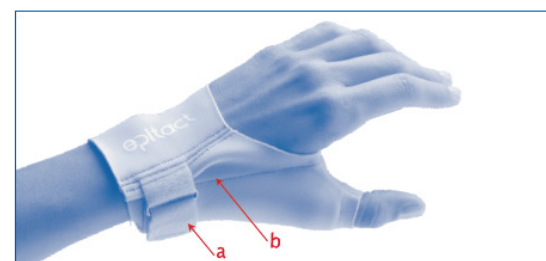

Die Daumenbandage sorgfältig von der Hand abnehmen und an der Luft trocknen lassen. **Das Produkt nicht erneut anlegen, bevor es nicht vollkommen getrocknet ist.** Die Daumenbandage anlegen und mithilfe des Klettbandes anpassen (a), das Vorhandensein einer Falte ist normal (b). Sie können den Vorgang wiederholen, die Daumenbandage kann mehrmals thermoformiert werden.