

The image shows the Clari cup product, a blue silicone menstrual cup, next to its black carrying case (Clari box) which is open. The Clari cup is shown both inside the case and outside. The background features a pink and white pattern of overlapping circles.

Clari
cup™

Clari cup
ist MEIN Cup!

Der erste Menstruationsbecher
aus antimikrobiellem Silikon

Claripharm
LABORATOIRES
Made in France

Eine gesunde, verantwortungsvolle und ökologische Alternative zu Tampons und Hygienebinden

- Menstruationsbecher aus antimikrobiellem Silikon
- Mitgelieferte Desinfektions- und Transportbox
- Einfach zum Einführen und Herausziehen
- 5 Jahre wiederverwendbar
- Bis zu 6 Stunden Schutz

Die richtige Grösse wählen

● Grösse 1 - klein

Leichter Fluss
Frauen, die nie geboren haben
Frauen, die *mini* oder *normal* Tampons benutzen

●● Grösse 2 - mittel

Mittelmässiger Fluss
Frauen, die vaginal oder per Kaiserschnitt geboren haben
Frauen, die *normal* oder *super* Tampons benutzen

●●● Grösse 3 - large


Starker Fluss
Frauen, die vaginal geboren haben
Frauen, die *super* oder *super plus* Tampons benutzen



Den Clari cup desinfizieren

So weit möglich zwischen jeder Einführung den Clari cup in der Clari box desinfizieren. Dazu den Clari cup mit Stiel nach unten in die Box legen und mit Wasser auffüllen. Mit offenem Deckel in der Mikrowelle während 5 Minuten bei 750 Watt erhitzen.

Clari cup kann auch in einer Pfanne mit kochendem Wasser während 7 Minuten desinfiziert werden.

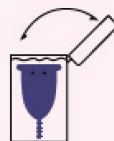

Warum Clari cup?

- Clari cup wird aus antimikrobiellem, medizinisch zugelassenem Silikon hergestellt.

Tampons und Hygienebinden enthalten chemische Produkte, die die Scheidenschleimhaut irritieren können.

- Clari cup ist hygienisch.

Hygienebinden fördern Hautpilz, da sie ein feuchtes Umfeld schaffen und Tampons können durch das Rückholbändchen Keime und Pilze in die Scheide einführen.

- Clari cup kann während 5 Jahren gebraucht und bis zu 6 Stunden durchgehend getragen werden.

Wegwerfbare Produkte verschmutzen unseren Planeten: eine Frau verwendet in ihrem Leben durchschnittlich 15'000 Hygieneartikel.

- Clari cup ist ideal beim Sport.

Dort wo Hygienebinden schnell verrutschen, bietet Clari cup Komfort und Bewegungsfreiheit. Clari cup ist auch bei Wasseraktivitäten völlig hermetisch, im Gegensatz zu Tampons, die sich mit Wasser vollsaugen.

Wie wird Clari cup verwendet?

Clari cup zu einem U formen.



Clari cup in die Scheide einführen.



Um den Clari cup zu entfernen:
Der Stiel hilft den Becher zu ergreifen.
Den Becher unten zusammen drücken, um den Saugeffekt zu lösen und vorsichtig herausziehen.



Den Becher leeren und mit kaltem Wasser ausspülen und so oft wie möglich in der Mikrowelle desinfizieren.



Clari cup wieder einführen.

